

OSOM[®] Trichomonas – Kurzanleitung




1



Teströhrchen in die beiliegende Halterung stellen.

0,5ml Probenpuffer mit beiliegender Tropfpipette in das Teströhrchen geben.

2

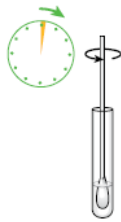

Abstrichtupfer in das Teströhrchen tauchen und gründlich verwirbeln. 1 Minute bei Raumtemperatur inkubieren.

Tipp: Laborwecker stellen

3



Abstrichtupfer aus dem Röhrchen ziehen, dabei das Röhrchen zusammendrücken und die Flüssigkeit aus dem Tupfer herauspressen.

Tipp: Mind. $\frac{1}{4}$ der ursprünglichen Flüssigkeitsmenge muss nach Entnahme des Tupfers im Röhrchen verbleiben!

4



Teststreifen aus dem Behälter nehmen und in das Teströhrchen tauchen. Behälter nach Entnahme des Teststreifens sofort wieder verschließen.

Exakt **10 Minuten** bei Raumtemperatur inkubieren.

Tipp: Laborwecker stellen

5



Ergebnisse direkt ablesen:

1 **rote** Kontrolllinie + 1 **blaue** Testlinie → **POSITIV!**

1 **rote** Kontrolllinie **ohne** Testlinie → **NEGATIV!**

Weder Kontroll- noch Testlinie sichtbar → **UNGÜLTIG!**

Test mit **neuer Probe** und **neuem Gefäß** wiederholen!

Tipp: Teststreifen zum Ablesen aus Röhrchen entnehmen